

# Opercat®

## Bolsa-apósito autoadhesiva

# Opercat®

## Bolsa-apósito autoadhesiva para protección de catéteres



Presentación (Libre de látex)

REFERENCIA	DIMENSIONES BOLSA	UNIDADES POR ESTUCHE	ESTUCHES POR CAJA	UNIDAD DE VENTA
0037407	5 x 5 cm	25	13	325
0037417	8 x 7,5 cm	25	13	325
0037427	16 x 5 cm	25	10	250

### Áreas de Utilización

DIMENSIONES:	USO RECOMENDADO:	UNIDADES:
5 x 5 cm	Catéteres para vías heparinizadas, normales y antireflujo.	Hospitalización.
8 x 7,5 cm	Catéteres femorales y yugulares curvos, sondas de gastrostomía y yeyunostomía para alimentación, etc.	Hemodiálisis, Digestivo.
16 x 5 cm	Catéteres tipo Percath, Hickman, Kherr, yugulares y femorales rectos. Catéteres temporales, de larga duración y permanentes.	Hemodiálisis, Cirugía, Onco-Hematología, Transplantes.

- Asegura la fijación de los catéteres
- Rápida y sencilla colocación y retirada del apósito
- Mejora la calidad de vida de los pacientes
- Garantiza la asepsia y esterilidad de la zona



FABRICADO POR:  
**IBERHOSPITEX, S.A.**  
Avda. Catalunya, nº 4  
08185 - LLIÇA DE VALL  
(Barcelona) - ESPAÑA  
Tel.: (34) 93 843 60 34  
Fax: (34) 93 843 61 11  
info@iberhospitex.com  
www.iberhospitex.com



DISTRIBUIDO POR:



# Opercat®: la mejor solución


OPERCAT® es una bolsa-apósito autoadhesiva estéril y de un solo uso, destinada a la protección de todo tipo de catéteres temporales y permanentes.

OPERCAT® es un apósito de fácil colocación para el personal sanitario que evita molestias a los pacientes durante su colocación y retirada, así como mejora la asepsia y calidad de vida de los pacientes.

### APLICACIÓN

Tras la introducción del catéter en el seno de la bolsa y la eliminación de las láminas protectoras, la tira adhesiva se fija al cuerpo del paciente cumpliendo una doble función:

- Fijar posicionalmente la bolsa-apósito con respecto al cuerpo del paciente.
- Mantener el catéter sujeto, dar libertad de movimiento y mejorar la asepsia.

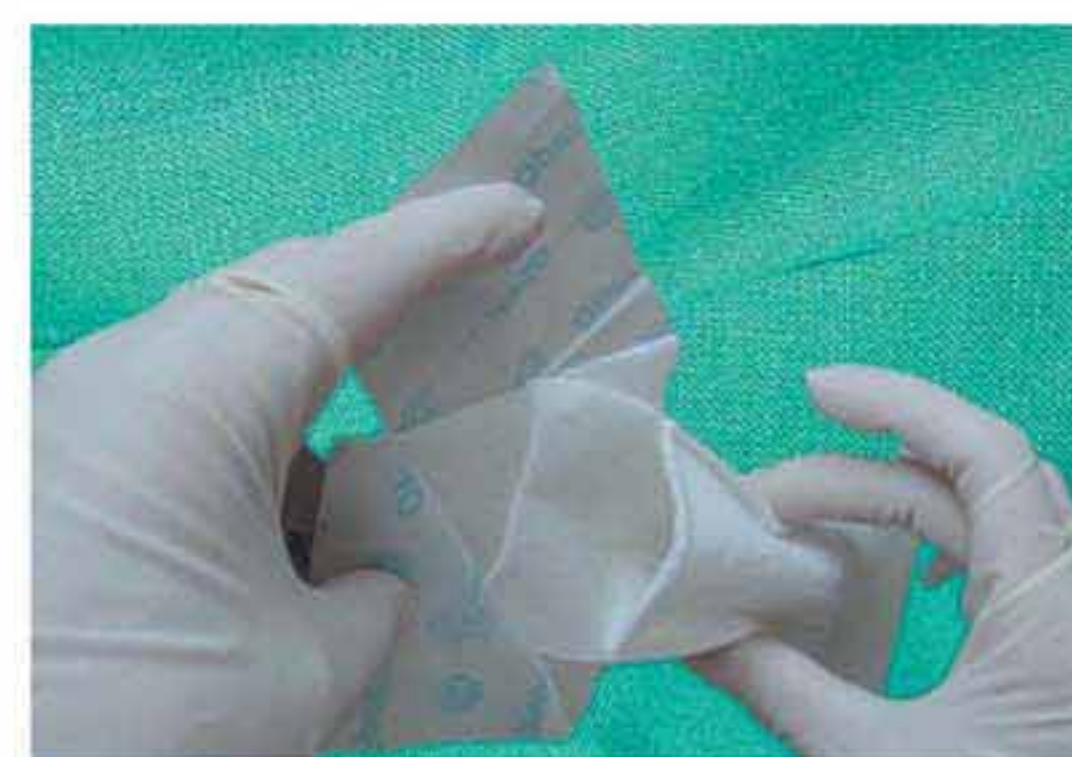

Rápida y sencilla colocación asegurando una fijación estable y una protección adecuada.

Tejido no tejido, extensible de alta porosidad. Su poder de adherencia le permite una perfecta fijación.

Prolongación del mismo material almohadillado de la bolsa (permeable y no adherente) para cubrir el orificio de salida de los catéteres.

Láminas protectoras dobladas para facilitar una colocación rápida y estéril, protegiendo la zona del apósito que cubre el orificio de salida de los catéteres.

Bolsa transpirable, con alto poder de absorción, apropiada para establecer un perfecto almohadillamiento al catéter y una barrera para los microorganismos. Recubierta en su totalidad, tanto interior como exteriormente, de una película permeable y no adherente.



Comodidad durante el tiempo de cateterización, facilitando el aseo personal del paciente incluso en el domicilio.



No se producen tirones ni descolocación de los catéteres. Sencilla y cómoda retirada sin tijeras ni instrumentos.

### APLICACIÓN EN:

Catéteres temporales, de larga duración y permanentes, vías heparinizadas, sondas de yeyunostomía y gastrostomía para alimentación, etc.

